



PT

Descrição do termômetro

- 1 Botão multifunções
- 2 Visor
- 3 Tampa do compartimento da pilha
- 4 Sensor de Medição / Ponta de medição
- 5 Modo de medição da temperatura corporal
- 6 Modo temperatura da água
- 7 Modo ambiente
- 8 Zona de Limpeza e desinfecção (Toda a superfície do termômetro)

Instruções de segurança importantes

- Siga as instruções de uso. Este documento fornece informações importantes de manuseamento e segurança do produto em relação a este dispositivo. Leia atentamente este documento antes de usar o dispositivo e guarde-o para referência futura.
- Este dispositivo deve ser usado apenas no corpo humano: via oral, rectal ou axilar. Não tente fazer a medição da temperatura em qualquer outra zona, como as orelhas, pois pode resultar em leituras falsas e algum dano.
- Não utilize este dispositivo se achar que está danificado ou se observar algo anormal no dispositivo.
- Recomendamos limpar este dispositivo de acordo com as instruções de limpeza, antes da primeira utilização, para higiene pessoal.
- É necessário respeitar sempre o tempo de medição mínimo até o sinal sonoro de erros!

Considerar que diferentes zonas de medição de temperatura requerem a continua utilização mesmo após o som. (Métodos de medição / Temperatura corporal normal).

Não procure mediá a temperatura do reto de uma pessoa com problemas retais. Pois pode levar a um agravamento da situação. Certifique-se que não deixa o dispositivo ao alcance das crianças, algumas peças são muito pequenas e podem ser engolidas. Esteja atento ao risco de estrangulamento no caso deste dispositivo ser fornecido com cabos ou tubos.

Não utilize o dispositivo na proximidade de campos electromagnéticos fortes, tais como, televisões ou instalações radiofónicas.

Mantenha uma distância mínima de 3 m a partir dos dispositivos mencionados quando se utiliza este dispositivo.

• Proteja o instrumento contra impactos e quedas!

• Evitar dobrar a sonda do termômetro mais de 45°

• Evite temperaturas ambientes superiores a 60 °C. NUNCA ferva o instrumento!

• Utilize apenas desinfetantes comerciais listados na secção «Limpeza e desinfecção» para limpeza do dispositivo e de forma a evitar danos no mesmo.

• Recomendamos que este dispositivo seja testado após 2 anos ou impato mecânico (ex.: Cair no Chão). Por favor, contate o representante da Marca Microlife para resolver a situação.

Aviso: O resultado da medição fornecido por este dispositivo não é um diagnóstico! Não confie apenas no resultado da medição.

As pilhas e dispositivos eletrónicos têm de ser eliminados em conformidade com os regulamentos locais aplicáveis, uma vez que não são considerados resíduos domésticos.

Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o dispositivo.

Peça aplicada tipo BF

Ligar o termômetro

Para ligar o termômetro, pressione o botão multifunções (1); um breve sinal sonoro indica que o termômetro está ligado (ON) e as luzes de fundo vermelha e verde acendem. É efetuado um teste ao visor. Deverão visualizar-se todos os ícones.

Teste de funcionamento

O funcionamento correto do termômetro é testado automaticamente sempre que o instrumento é ligado. Se for detetada qualquer anomalia (medição incorreta), o visor indicará a informação «Err», ficando impossibilitada a medição. Caso esta situação se verifique, é necessário substituir o termômetro.

Selección o modo de medição

Pressione o botão multifunções (1) para selecionar o modo desejado. O dispositivo irá configurar o modo escolhido se não houver nenhuma troca dentro de 3 segundos. Depois da seleção do modo estar concluída, o termômetro está pronto a ser utilizado.

Utilização do termômetro

Medição o modo de temperatura corporal (5)
A última medição efetuada será indicada no visor (2) automaticamente durante 2 segundos com o ícone «M».

Medição o modo ambiente (7)
A temperatura será exibida continuamente sem luz de fundo quando a temperatura estiver entre -10 °- +50 °C.

Medição / Temperatura corporal normal
Debaixo do braço (axilar) | 34,7 - 37,3 °C

Higieniza a axila com uma toalha seca. Coloque o sensor de temperatura sob o braço no centro da axila, de modo a que a ponta do dispositivo toque na pele, e posição o braço próximo ao corpo. Isso garante que o ar do ambiente não afete a leitura. Porque a medição na axila, leva mais tempo para atingir uma temperatura estável, este modo deve aguardar pelo menos 5 minutos, independentemente do nível sonoro.

No boca (oral) | 35,5 - 37,5 °C

Não ingira ou beba algo quente ou frio 10 minutos antes da medição. A boca deve manter-se fechada 2 minutos depois do começo da leitura.

Coloque o termômetro num dos lados sob a língua, à esquerda ou à direita do freio da língua. O sensor de medição (4) tem de estar em contacto com a mucosa. Feche a boca e respeite normalmente pelo nariz para evitar que a medição seja influenciada pela inspiração/expiração.

Se isso não for possível devido a vias aéreas bloqueadas, outro método de medição deve ser utilizado.

Tempo de medição aproximado: 8 segundos!

• No ânus (rectal) | 36,6 - 38,0 °C

Introduza cuidadosamente o sensor de medição (4) do termômetro 2 a 3 cm dentro do ânus.

Recomenda-se a utilização de uma tampa de sonda (descartável) e a utilização de um lubrificante.

Caso não tenha certeza de como realizar este método de medição, consulte um profissional de saúde para obter ajuda.

Tempo de medição aproximado: 8 segundos!

Limpeza e desinfecção

Para desinfetar o dispositivo em casa, utilize um cotoneiro com álcool isopropílico 70% ou com um algodão húmido com 70% álcool isopropílico para limpar sujidade da sonda e da superfície do termômetro ao longo do seu comprimento. De seguida, o termômetro (ver

Functietest

De werking van de thermometer wordt elke keer automatisch getest wanneer hij wordt aangezet. Als er een defect word geconstateerd (meting onnauwkeurig) dan wordt aangegeven door «Err» in het display, enkele seconden later dan de defect. In dat geval moet de thermometer worden verwijderd.

Selecteren van de meetmodus

Druk op de multifunctieknop (1) om de gewenste meetmodus te selecteren; het apparaat zal de gekozen modus na 3 seconden instellen wanneer er niet meer gewisseld wordt. Na het voltooien van de modusselectie, is de thermometer gereed voor gebruik.

Gebruik van thermometer**Meten in lichaamsmodus (6)**

De laatste meting zal automatisch worden getoond op het display (2) gedurende 2 seconden met het «M» symbool. Bij een kamertemperatuur van minder dan 34 °C verschijnt eerst het symbool «» en in de volgende 2 seconden het «C» symbool.

• Het meten kan worden gestopt door de knop (1) te drukken. De thermometer kan worden verwijderd.

Symmetrische leestijd (3)

Om de gewenste meetmethode. Tijdens het meten wordt de huidige temperatuur continu knipperend weergegeven. Wanneer een lange pieptoon hoort en de temperatuur in het display niet meer knippert, is de verachte temperatuur in bepaalde temperatuur vastgesteld en kan de thermometer worden afgeladen.

• Drie piepsignalen in een rood verlicht LCD maken de patiënt erop attent dat hij/zij een temperatuur heeft van boven de 37,5 °C. Referentie: Oraal gemeten temperatuur.

• Om meer resultaten te vergelijken dient u met minimaal 1 minut interval te meten.

Meten in waterbadmodus (5)

De laatste meting zal automatisch worden getoond, zonder backlight, wanneer de temperatuur tussen de 5 - 50 °C graden Celsius is.

Meten in omgevingsmodus (7)

De kamertemperatuur zal automatisch worden getoond, zonder backlight, wanneer de temperatuur tussen de 10 - +50 °C graden Celsius is.

• Om de levensduur van de batterij te verlengen, kunt u de thermometer uitzetten voor de temperatuur die u wilt meten.

Meetmethoden / Normale lichaamstemperatuur**Onder de oksel (axillair) | 35,5 - 37,3 °C**

Dep de oksels af met een droge handdoek. Plaats de meetsensor (4) onder de arm in het midden van de oksel, zodat de punt van de huid recht aan de arm maakt het lichaam. Dit zorgt ervoor dat de kamertemperatuur van de meting niet beïnvloedt, omdat de oksel meer tijd nodig heeft om een temperatuur te bereiken. Wacht 5 minuten, ongeacht het piepgeluid.

In de mond (oraal) | 35,5 - 37,5 °C

Eet of drink iets warm of koud 10 minuten voor de meting. De mond moet gesloten blijven tot 2 minuten voorafgaand aan het begin van de meting. Plaats de thermometer onder de tong, links of rechts naast het heupsel (5). Sluit de mond en adem gelijkmatig door de neus om te voorkomen dat de meting wordt beïnvloed door de ademhaling via de mond.

Indien dit niet mogelijk is vanwege geblokkeerde luchtwegen, moet een andere meetmethode worden gebruikt.

Meetjeed ca: 8 seconden!**PROMPTO:** Onder de oksel moet de meting 5 minuten worden getoond.

• De oksel moet de kamertemperatuur niet beïnvloeden.

• De oksel moet de kamertemperatuur niet beïnv